

ユーザーズマニュアル

2019.3.20改定

四つ折りストレッチャー


I. 仕様

1. 使用時サイズ (長さ×幅×高さ): 2140mm×550mm×120mm
2. 折りたたみサイズ (長さ×幅×高さ): 580mm×210mm×140mm
3. 収納ケースのサイズ(1個): 640mm×295mm×180mm
4. 製品重量: 6kg
5. 総重量: 6.8kg
6. 積載耐荷重: 159kg以下

II. 使用目的・注意

- この折りたたみ式ストレッチャーは、主に骨折・歩行困難患者を輸送するために使用します。患者の輸送以外に使用しないでください。
- 脊髄・頸部などの損傷で移動時に固定処置が必要とされる患者には専用固定器具等を用いて、専門家の指示に従い使用してください。
- 組立・展開後に垂直方向(縦方向)にしないでください。ストッパー機能が付いていないので、真ん中付近より折り畳まれ、頭部などへ打撲の危険があります。また、立て掛けての保管・設置も行わないでください。
- 布地部分に刃物など尖った物を当てると破れる恐れがありますので注意してください。
- 輸送時は安全ベルトを使用してください。
- 危険な使用環境(階段・段差・溝・急こう配・滑り易い路面)での使用は患者が落下しない様に気を付けて使用してください。
- 担架・シートの上で立ち上がらないでください。
- 火気厳禁です。
- ネジ/金具の脱落・緩み、フレーム亀裂/曲がり、シートの裂傷を確認してから使用してください。
- 小さく折り畳む構造上、どうしても摩擦によりシートに細かな汚れ・しわ等が付着してしまう場合がありますが、使用上問題はありませのでご了承ください。
- **使用後ケースに収納する為、折り畳む時はシート部が可動部へ挟まれない(噛み込み)様に注意して折り畳んでください。可動部に挟まれたまま(噛み込んだまま)収納すると、次の組立・展開時にシートが破れる可能性があります。**
- 使用後は必ず各部の点検・整備を行ってください。
- 保管は必ず屋内に保管してください。水の当たる所や湿気の多い所での保管は避けてください。
- 未使用でも1年に1回は各部の点検を行ってください。
- 修理等が必要な場合は、販売店に連絡して頂き、回収方法・費用等を問い合わせください。
- ご購入後、5年程度経過しましたら販売店で、お預かり点検をお勧めします。回収方法・費用は販売店にお問い合わせください。

III. 使用方法

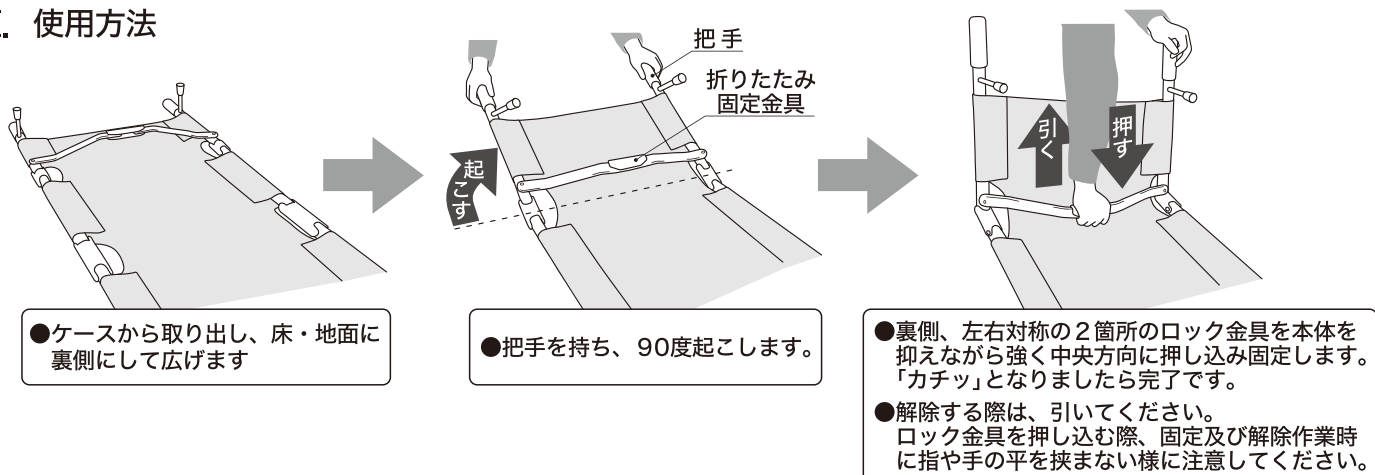

- 表面を上にして必ず平らな場所で患者を乗せて、ベルトで固定し2～4名で把手をしっかり持ち水平を保ち使用してください。

輸入販売元

ライト・サービス株式会社

〒176-0025 東京都練馬区中村南3-3-5

組立・収納解説動画

<http://www.youtube.com/user/LSWEBSHOP>



保証について

ライト・サービス株式会社はご購入日から1年間、当社製品を保証致します。(未使用の保存期間の場合は5年間)但し、製品の間違った使用・改造、説明書通りに補修しなかったことに起因する故障・天災については、この保証を適用できません。保証については、使用によって消耗した部分(シートやベルトのやぶれ等含む)や激しい取り扱いによって生じた故障箇所を無償交換するものではありません。

また、保証は部品の提供もしくは本体の交換であり、修理するものではありません。

初期不良の場合は7日以内にご連絡ください。この保証は日本国内のみに有効です。

保証規定

お願い

1. まず商品がお手元に届きましたら、注文と違うものが送られていないか、商品に問題がないかをすぐにご確認ください。
2. 商品の破損、動作不良がある場合または、ご注文と異なる場合はお届け後7日以内にご連絡ください。
すぐに新品と交換させていただきます。
3. 商品に欠陥がある場合を除き、返品には応じません。お客様のご都合による返品は、お受け出来ませんのでご了承ください。
(通信販売の場合、直接的勧誘を受けないという理由から、クーリングオフ制度の対象外となっております。)
4. お届けから8日間以上経ちますといかなる交換・返品につきましてもご相談に応じかねますのでご了承ください。

① 保証期間

商品がお客様のお手元に届いてから以下の期間になります。

- (1) 初期不良返品受付は14日間です。(ご連絡は7日以内にお願いたします。)

② 初期不良

初品不良の際には「④部品交換のご依頼について」の手続きにより該当部品あるいは、商品本体を無償で交換致します。

但し、該当商品が入手困難の場合は同等の別商品と交換になる場合がありますのでご了承ください。

以下のすべての条件を満たしている場合、弊社は初期不良と認めます。

- (1) 商品到着より14日以内に該当商品が弊社に到着していること。
- (2) 商品のメーカーや弊社の診断により不良と認定されていること。
- (3) お買い上げ時の梱包・箱・領収書・説明書・保証書等すべての付属品が揃っていること。
- (4) 商品に改造、特殊な設定を行っていないこと。

③ 保証対象外になる場合

次のような場合の故障・損傷は、保証期間内であっても保証対象外になります。

- (1) 説明書記載の使用法または、注意に反した取り扱いによる場合。
- (2) 保全上の不備及び改造・特殊な設定や部品交換による場合。
- (3) お客様のお手元に渡った後の輸送、移動時の落下等、取り扱いの不備による場合。
- (4) 火災・地震・水害・落雷・その他天災による場合。
- (5) 該当商品の保証書がない場合。
- (6) 用途以外でのご使用で生じた破損・故障。
- (7) 本製品以外の原因による破損・故障。
- (8) 消耗した部分の部品交換。

※当商品は1年間を保証しておりますが、あくまで本製品に欠陥があった場合であり、度重なる使用によって消耗した部品や激しい使用によって生じた故障箇所を無償修理または、無償交換するものではありません。

④ 部品交換のご依頼について

- (1) 弊社が検証後、該当部品をお送りいたします。
- (2) 新しい部品及び初期不良交換品はお客様へご連絡後にお送りいたします。
- (3) お預かりした商品に異常が見受けられない場合は、送料をご負担いただきます。